

Anwendung:

Für die Eigenanwendung, sowie für professionelle Anwendung durch medizinisches Personal geeignet.

1. Entfernen Sie die Kappe des Probenröhrchens und stecken Sie den Trichter in die Öffnung.
2. Für optimale Ergebnisse: Husten Sie 2- mal, wenn möglich, mit geschlossenem Mund.
3. Drehen Sie den Verschluss des Wasserbehälters auf und geben Sie den gesamten Wasserinhalt in Ihren Mund.
4. Befolgen Sie eine oder beide der folgenden Abnahmeanweisungen:
Option 1: Gurgeln Sie mit dem Wasser für 10 Sekunden lang im hinteren Rachenraum.
Option 2: Spülen Sie das Wasser für 10 Sekunden durch Ihren Mund.
5. Transferieren Sie die Flüssigkeit über den Trichter in das Probenröhrchen.
6. Verschließen Sie das Probenröhrchen und entsorgen Sie den Trichter und Wasserbehälter.
7. Schütteln Sie das Röhrchen für ein paar Sekunden und kleben Sie den beiliegenden Barcode senkrecht auf das Probenröhrchen.
Anschließend geben Sie das verschlossene Probenröhrchen zurück in den Transportbeutel.

ACHTUNG: Bitte den kleinen Pfropfen im Probenröhrchen nicht entfernen oder berühren. Dieser löst sich, sobald Sie Ihr Probenmaterial in das Röhrchen überführt haben langsam auf und stabilisiert Ihre Probe.